

Käyttöohje

Valmista käyttölaimennos puhtaaseen veteen. Käytetty liuos vaihdetaan kun se on näkyvästi likaantunut. Suositellaan käyttämään tislattua vettä.

Control käyttö- ja laimennusohjeet	Control	Vesi	Vaikutus-aika	
Pintadesinfektio	12ml	1000ml	1min	Huuhdellaan tarvittaessa
Eritetahradesinfektio, sopii sekä 1 että 2- vaiheiseen käsittelyyn	12ml	1000ml	1min	
Välinedesinfektio, upotus	12ml	1000ml	5min	Huuhdellaan tarvittaessa
- hammashuollon instrumentit	12ml	1000ml	10min	
- itiöt ja biofilmi	12ml	1000ml	30min	Huuhdellaan
- hammashuollon hoitokoneen biofilmin poistaminen letkustosta	12ml	1000ml	30min	Huuhdellaan
Ultraäänipesulaite	12ml	1000ml	5min	Huuhdellaan tarvittaessa
Pyykinpesu desinfiointi, huom. lisää Control huuhteluun	14ml	1kg		

Huomioitavaa : Noudata laitevalmistajien ohjeita.

TECcare Control tehoaa : bakteerit, hiivat ja sienet, vaipalliset ja vaipattomat virukset, mukobakteerit, coccidit, itiöt ja biofilmi.

Puhtaaseen veteen valmistettu käyttöliuos säilyy tiivisteen viimeiseen käyttöpäivään asti.

