

SUOMEN LAITOSTEKSTIILIT KY  
Laajakaista 3 B, ovi E  
96400 ROVANIEMI  
FINLAND  
Tel: + 358407778000  
E-mail: [info@suomenlaitostekstiilit.com](mailto:info@suomenlaitostekstiilit.com)  
[www.suomenlaitostekstiilit.com](http://www.suomenlaitostekstiilit.com)

Asennus- ja käyttöohje  
Haaravyö HAR1

28.2.2025

Tuote: Haaravyö HAR1

Basic UDI-DI: 643007748HAR199

UDI-DI: 6430077480032

GMDN code: 13356



Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi pyörätuoliin/geriatriseen tuoliin estääkseen istujan liukumisen pois tuolilta. Kaikenlainen muu käyttö on kielletty. Jos toimitus on vahingoittunut tai puutteellinen, älä ota tuotetta käyttöön. Ota välittömästi yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Rikkinäinen ja loppuun käytetty tuote hävitetään. Hävittäminen: viedään jätteenkäsittelylaitokseen: Lajittelematon jäte.

Tukeva ja kestävä haaravyö tuo turvaa pyörätuolin tai geriatriksen tuolin käyttäjille. Se toimii turvavyön tavoin ja T-muotoisena estää käyttäjää liukumasta istuimelta. Haaravyössä on pikalukitus, joten sen käyttö on helppoa ja nopeaa. Solumuovi tekee vyöstä pehmeän ja mukavan. Materiaali on vedenpitävää ja todella helppo pyyhkiä ja pestä puhtaaksi. Yksi koko sopii kaikille, pitkät säätövarat.

Asennusohje:

Aseta haaravyö istuimelle, leveämpi pää tulee eteen. Haaravyö HAR1 laitetaan tuolille alempi turvavyönauha kiinnitetään tuoliin kuvan mukaisesti.

(kuva: haaravyö alussa)



Henkilö istuu tuolille ja haaravyön ylempi turvavyönauha kierretään henkilön vatsan kautta tuolin taakse, siten että lukkopiuha kierretään myös pyörätuolin pystyputken ympäri kertaalleen. Siten tuolissa istuja ei saa pyöritettyä lukkoa omalle kohdalleen. Katso: <https://youtube.com/shorts/P6TVN3LpIFc>

Jos lukko on sivulla siten että henkilö saa sen itse auki niin pesumerkkiin ei tule mitään tekstiä asiasta. Jos lukko on takana siten että henkilö ei saa sitä itse auki niin pesumerkkiin tulee teksti: Käyttö vain lääkärin luvalla ja henkilökunnan läsnäollessa.

(kuva: haaravyö kiinnitettynä)



(kuva: haaravyö takaa)



Painorajoitus: 200 kg

Pesulämpötila: 80 C, pestään pesupussissa lukot suljettuna, pehmuste poistettava ennen pesua.

Uudelleenkäyttö: Ennen uudelleenkäyttöä täytyy silmämääräisesti tarkistaa ettei ompelusaumoissa, materiaalissa ja tikkauslangoissa ole ratkeamia tai reikiä. Jos sellaisia löytyy niin tuote on hävitettävä.

Rikkinäinen ja loppuunkäytetty tuote hävitetään: Hävittäminen: viedään jätteenkäsittelylaitokseen: Lajittelematon jäte.

CE-merkitty